

ベッド・
ベッド
付属品



床ずれ防止用具

床ずれ
防止用具

床ずれってなに？

寝返りが打てないと、同じ場所に体重がかかり続けるので、血の流れが悪くなり、床ずれができます。また、そこにずれ力が加わるとより発生しやすくなります。

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

圧迫

1 細胞は血から栄養をもらっています。

2 血の流れが悪いと栄養がもらえません。

↓ 圧迫 ↓ 圧迫

3 とうとう細胞が死んでしまいました。

床ずれ

ずれ力

1

ハサミと同じ力
ハサミで紙を切る時と同じような力がかかります。

2

床ずれ

発生しやすい部位

歩行器

まずは床ずれになりやすさを調べましょう

OHスケール 次の質問に答えると、床ずれになりやすさがわかります。

Q1 ベッドの上で自分で寝返りできますか？	A1 ・できる ・どちらでもない ・できない	0点 1.5点 3点	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> 点	
Q2 お尻の骨の飛び出し具合は次のうちどれですか？		A2 ・正常 ・軽度・中等度 ・高度	0点 1.5点 3点	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> 点
Q3 むくみはありますか？	A3 ・いいえ ・はい	0点 3点	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> 点	
Q4 関節が硬くなって手足を伸ばしにくいですか？	A4 ・いいえ ・はい	0点 1点	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> 点	

合計点数は
何点でしたか？

1点でもついた人は、床ずれになりやすい人です。また、点数が高い人ほど床ずれになりやすい人です。

合計 点

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

OHスケールとリスクレベル			
合計点数	リスク	床ずれ発症率(目安)	治癒期間(目安)
0点	リスクなし・予防	—	—
1～3点	軽度リスク	約25%以下	40日
4～6点	中等度リスク	約26～65%	57日
7～10点	高度リスク	約66%以上	173日

単位: cm

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税 と表記のない商品に限る)

サービスコード/床ずれ防止用具 介護給付: 171005 予防給付: 671005

ベッド・
ベッド
付属品

使用者の介護環境も考えてマットレスを選びましょう

床ずれ防止用具は床ずれができてから使うだけでなく、床ずれができる前から「床ずれを防止」するために使う用具です。使用者の状態や床ずれになりやすさを把握し、マットレスを選びましょう。

合計点数	介護力あり	介護力なし	タイプ	特徴
0点	布団、ベッドマットレス	体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm未満)	静止型	体圧分散性能と、安楽性や安定性のバランスに優れています。
1~3点		体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm以上) 上敷き型エアマットレスなど	ハイブリッド型	ウレタンフォームとエアを組み合わせたマットレスです。
4~6点	体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm未満)	体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm以上)	圧切替型	エアを自動的に出し入れし、圧がかかる場所を移動させるマットレスです。
7~10点	体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm以上) 上敷き型エアマットレス ハイブリッド型など	コンピューター制御エアマットレス、 ハイブリッド型など		

床ずれ
防止用具


体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

床ずれ対応マットレス一覧表

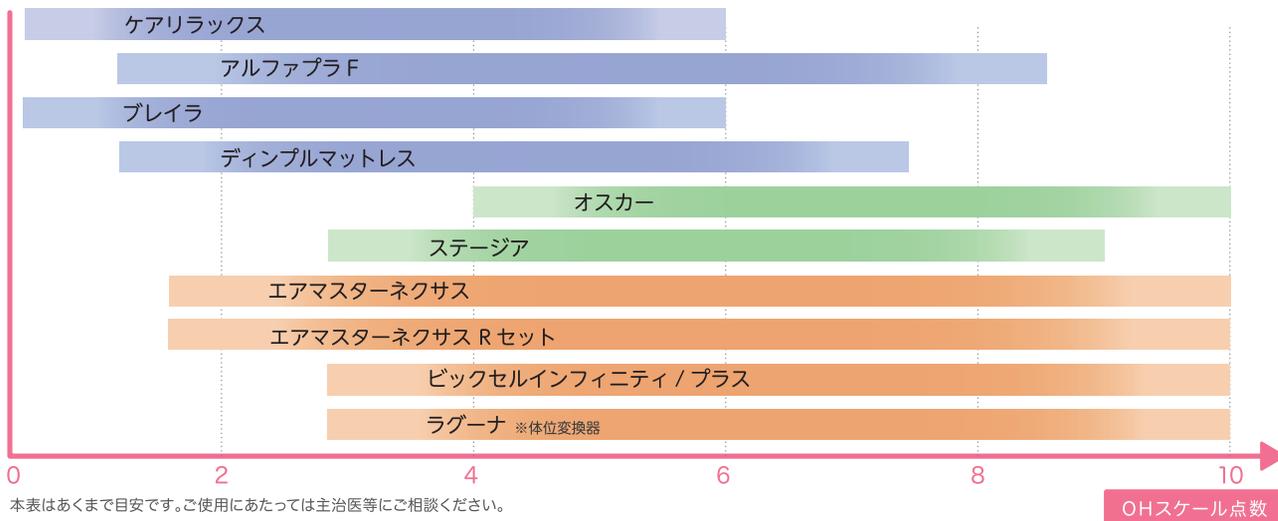

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

よりよい介護のために

身体機能を維持・向上させたり、床ずれを防止するために、次のようなポイントで観察をして、必要なケアを実践しましょう。

<p>観察ポイント例</p> <p>動作</p> <ul style="list-style-type: none"> 背上げの頻度 床上移動の仕方 起き上がりの仕方 移乗の仕方 かかとのずれ力 	<p>必要なケア</p> <ul style="list-style-type: none"> ○質の高い動作介助 ○用具の利用 	<p>観察ポイント例</p> <p>身体状況・体位</p> <ul style="list-style-type: none"> こやしゆく 関節拘縮のレベル えんばい 円背のレベル 麻痺の箇所 側臥位の頻度 好意体位の有無 	<p>必要なケア</p> <ul style="list-style-type: none"> ○質の高い動作介助 ○ポジショニング
---	--	--	--

※しみや汚れ、タバコのこげ跡など破損がひどい場合は、マットレスの実費を請求させていただきます。

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

ベッド・
ベッド
付属品




床ずれ防止用具

床ずれ
防止用具

ケアリラックス

日本ケアサブライ

予防～軽度 静止型 グリーン
ケア

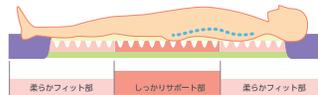

ケアリラックスは、リハビリ期や少し歩ける方の床ずれ防止に適した安定感のあるウレタンフォームマットレスです。特殊構造により、ベッド背上げ時の苦しさ・ずれを軽減させる新発想のマットレスで、長時間の背上げ体位もリラックスして行えます。

商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 レギュラー	13-5400-1	00614-000003

サイズ：幅91×全長191×厚さ10cm 重さ：7.6kg

商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 ショート	13-5404-1	00614-000003

サイズ：幅91×全長181×厚さ10cm 重さ：7.3kg

商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 レギュラー	13-5399-1	00614-000003

サイズ：幅83×全長191×厚さ10cm 重さ：7kg


材質/外カバー：ポリウレタンラミネート加工布(抗菌・防水) 内カバー：ポリエステルサテン マット：ポリウレタンフォーム

ご利用者負担額	(1割)	(2割)	(3割)	月額レンタル料金
500円	1,000円	1,500円	5,000円	

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

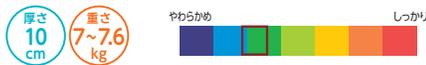


歩行
補助杖

アルファプラシ 撥水・防水

タイカ

上層と中層に柔らかめの高弾性無膜ウレタンフォームを使用し、さらにアルファゲルを組み合わせることで、床ずれが心配になり始めた方に適した体圧分散を行います。

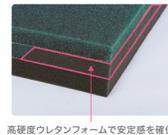

高弾性ウレタンフォームで安定感を確保



歩行者

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

●熱の放散性能が30%以上向上。(撥水・防水カバータイプでの比較)

●3層が適度な弾力で身体を押し上げるため、寝返り、起き上がり。ベッドから立ち上がるといった一連の動作をサポートします。



マットレスが押し返すような感覚で、立ち上がりをサポート。

材質：シリコーンゲル/ポリウレタンフォーム(撥水・防水) カバー：表地/ポリエステル 裏地/ポリウレタン

商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 レギュラー	13-5570-1	00563-000103
91cm幅 ショート	13-5572-1	00563-000104

サイズ：幅91×全長195(ショート181)×厚さ10cm マット重さ：7.6kg(ショート7.1kg)

商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 レギュラー	13-5571-1	00563-000101

サイズ：幅83×全長195×厚さ10cm マット重さ：6.9kg

ご利用者負担額	(1割)	(2割)	(3割)	月額レンタル料金
500円	1,000円	1,500円	5,000円	


介護保険
購入
対象品

販売品

情報

アルファプラF 撥水・防水

タイカ

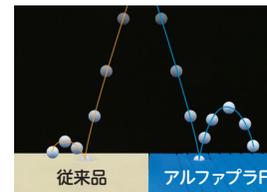

独自のスリット加工によりマットレスが身体にフィット。体重の軽い方でも十分に身体が沈み込み、高い体圧分散効果が得られます。変形してもすばやく戻る高弾性。適度な弾力が少ない力での寝返りや起き上がりをサポートします。

商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 レギュラー	13-5455-1	00563-000059
91cm幅 ショート	13-5457-1	00563-000058

サイズ：幅91×全長195(ショート181)×厚さ13cm 重さ：9.5kg(ショート8.8kg)

商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 レギュラー	13-5454-1	00563-000056

サイズ：幅83×全長195×厚さ13cm 重さ：8.7kg(ショート8.1kg)

材質/マット：アルファゲル、ポリウレタンフォーム、カバー：表地 ポリエステル、裏地 ポリウレタン

ご利用者負担額	(1割)	(2割)	(3割)	月額レンタル料金
700円	1,400円	2,100円	7,000円	

単位: cm


税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税 と表記のない商品に限る)

サービスコード/床ずれ防止用具 介護給付: 171005 予防給付: 671005

ベッド・
ベッド
付属品


ストレッチグライドマットレス

パラマウントベッド

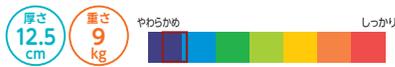

軽度～中度 静止型

身体の部位に応じた、ウレタンフォーム素材とカットニングの組み合わせにより、優れた体圧分散性能を発揮します。

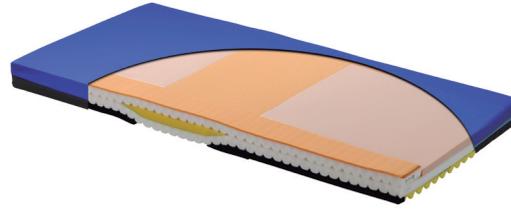

商品名	商品番号	商品コード
[清拭]91cm幅 レギュラー	13-5489-1	00170-000720
サイズ: 幅 91 × 全長 191 × 厚さ 12.5cm 重さ: 9kg		
材質/カバー: ポリエステル、ポリウレタン、マット: ウレタンフォーム・ポリエステル		
商品名	商品番号	商品コード
[通気]91cm幅 レギュラー	13-5493-1	00170-000725
サイズ: 幅 91 × 全長 191 × 厚さ 12.5cm 重さ: 9kg		
材質/カバー: ポリエステル、ウレタンフォーム マット: ウレタンフォーム、ポリエステル		
ご利用者負担額 (1割)	500 円	月額レンタル料金
(2割)	1,000 円	5,000 円
(3割)	1,500 円	

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖


エバープライウドマットレス (ドライタイプ)

パラマウントベッド



エクストラソフト面 軽度～中度 静止型

ソフト面 予防～軽度 静止型

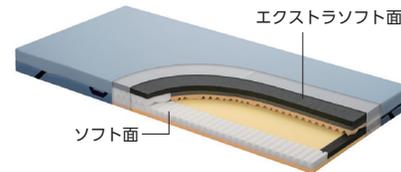

体圧分散、ずれ軽減、蒸れ軽減の3つの機能で床ずれ防止を多面的にサポート

商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 レギュラー	13-5665-1	00170-000966
サイズ: 幅91×全長191×厚さ13cm マット重さ: 11kg		
ご利用者負担額 (1割)	500 円	月額レンタル料金
(2割)	1,000 円	5,000 円
(3割)	1,500 円	

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品


スロープ

移動用
リフト・
つり具

ディンプルマットレス

ケープ

圧縮から変形へ発想を転換したディンプル形状です。かかとの骨突出部位をピンポイントで圧力解放し、各部位に最適な体圧分散を実現します。沈み込みを抑えた寝姿勢を保持するほか、離床・端座位も安定して行えます。

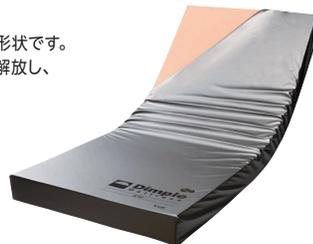

被験者/身長約 155cm、体重約 50kg、BMI 値約 20.8 測定器/ABW 社製 ERGO CLASSIC

商品名	商品番号	商品コード
90cm幅 レギュラー	13-5422-1	00206-000070
サイズ: 幅90×全長191×厚さ12cm 重さ: 6.6kg		
商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 レギュラー	13-5435-1	00206-000070
サイズ: 幅83×全長191×厚さ12cm 重さ: 6kg		
材質/カバー: (上面側面) ポリウレタンラミネート加工布、(下面) ナイロンオックス		
マット: (1、2層目) ラバータッチウレタンフォーム、(2層目サイド、3層目) 高硬度ウレタンフォーム		
ご利用者負担額 (1割)	400 円	月額レンタル料金
(2割)	800 円	4,000 円
(3割)	1,200 円	

ブレイラハイブリッドケアマットレス

グローバル産業

柔らかいのに動きやすい、通気と防水の両面仕様、床ずれ防止マットレス。



商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 レギュラー	13-5396-1	01149-000015
サイズ: 幅91×全長195×厚さ8cm 重さ: 13.5kg		
●中材: 天然ラテックス ●カバー: 防水面: ナイロン100%、通気面: ポリエステル100%		
ご利用者負担額 (1割)	600 円	月額レンタル料金
(2割)	1,200 円	6,000 円
(3割)	1,800 円	

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

ベッド・
ベッド
付属品



床ずれ防止用具

床ずれ
防止用具

オスカー

モルテン

軽度～
リスク保有者 ハイリフト

体位
変換器



認知症
老人
徘徊感知
機器

●オスカーが備えている8つの特性

- 体圧分散性能
- 除圧性能
- ずれ力対策
- 寝心地
- 座位安定性
- むれ対策
- ひえ対策
- 体位変換

●簡単なリモコン操作と場所を取らない内臓式ポンプ

●安全・安心のための充実した設計

安全：心臓マッサージなど緊急時に素早く対応できる
CPR ボタン/CPR ユニット)

安心：リハビリモード / 背上げモード / 強力除湿モード

厚さ
17
cm

重さ
11.5～13.5
kg

手すり

優れた除圧性能（2種類の圧切替モード）

利用者様の身体状況と自動体位変換の動きに合わせて2種類の圧切替の動き（凹凸、除圧）を行います。
（マニュアルモードを使用するとお好みの動きに設定ができます。）


歩行
補助杖

●圧切替<安定重視>

自動体位変換をする時や圧切替の動きを抑えたい時は、身体の安定性を確保するため、身体の75%をマイクロエアセルで支え、残りの25%で除圧を行います。

<安定重視>がオスカーの標準的な（おすすめの）圧切替の動きです。


歩行者

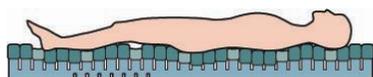

<安定重視>の圧切替モード

●圧切替<除圧重視>

自動体位変換をしない時で、圧切替の動きが気にならない時は、除圧面積を増やすため、身体の50%をマイクロエアセルで支え、残りの50%で除圧を行います。

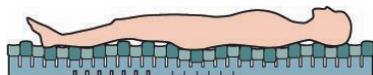

<除圧重視>の圧切替モード

車椅子・
車椅子
付属品


スロープ

移動用
リフト・
つり具

利用者様にやさしい体位変換

4つのポジショニングセルで体位変換を行います。下肢用ポジショニングセルがひざを曲げながらひざ部～大腿部を優しく傾け、上体用ポジショニングセルが腰部～肩部を優しく傾けます。

4つの
ポジショニングセル

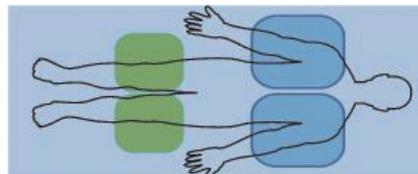

■ 下肢用ポジショニングセル ■ 上体用ポジショニングセル

商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 レギュラー	13-5466-1	00054-000137
サイズ：幅91×全長193×厚さ17cm マット重さ：13.5kg		
商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 ショート	13-5468-1	00054-000137
サイズ：幅91×全長182×厚さ17cm マット重さ：13kg		
商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 レギュラー	13-5465-1	00054-000137
サイズ：幅83×全長193×厚さ17cm マット重さ：12kg		
商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 ショート	13-5467-1	00054-000137
サイズ：幅83×全長182×厚さ17cm マット重さ：11.5kg		
ご利用者負担額 (1割)	900円	月額レンタル料金 9,000円
	(2割) 1,800円	
	(3割) 2,700円	

介護保険
購入
対象品

ステージア

モルテン

体圧分散性能と除圧性能を向上し、さらにエアマットレスの弱点を対策

軽度～
リスク保有者 ハイリフト

販売品



情報

●ステージアが備えている7つの特性

- 体圧分散性能
- 除圧性能
- ずれ力対策
- 寝心地
- 座位安定性
- むれ対策
- ひえ対策

●簡単なリモコン操作と場所を取らない内臓式ポンプ

●安全・安心のための充実した設計

(安全：心臓マッサージなど緊急時はリハビリモードで素早い対応が可能)
(安心：リハビリモード/背上げモード/強力除湿モード)

商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 レギュラー	13-5410-1	00054-000115
サイズ：幅91×全長193×厚さ13cm マット重さ：11kg		
商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 ショート	13-5412-1	00054-000115
サイズ：幅91×全長182×厚さ13cm マット重さ：10.5kg		
商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 レギュラー	13-5409-1	00054-000115
サイズ：幅83×全長193×厚さ13cm マット重さ：10.0kg		
材質/カバー：ウレタン合成、マット：<マイクロエアセル>ウレタンフィルム <フィッティング層>底着き防止層>高耐久ウレタンフォーム		
ご利用者負担額 (1割)	700円	月額レンタル料金 7,000円
	(2割) 1,400円	
	(3割) 2,100円	

厚さ
13
cm

重さ
10～11
kg

単位: cm

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税 と表記のない商品に限る)

サービスコード/床ずれ防止用具 介護給付: 171005 予防給付: 671005


ベッド・
ベッド
付属品

エアマスターネクサス Rセット


ケープ

軽度〜
リスク保有者 圧切替型

AIR MASTER NEXUS R

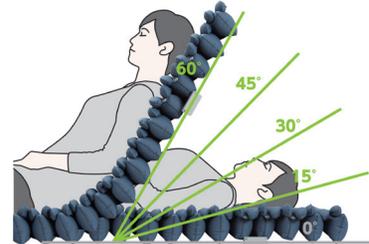

自動ヘッドアップ
マットレスに内蔵したセンサがヘッドアップ角度を検知。角度に応じて、マットレス内圧と動きを最適な状態に自動調整します。

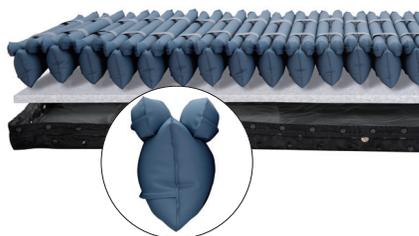

ずれを吸収するデュアルフィットセル®
ひとつのセルに小さなセルがふたつ付いている
"デュアルフィットセル®"は、体の凹凸にシなやかにフィットします。きめ細かな体圧分散と安定感の両立を可能にしました。



かんたんモード
体重40~60kgの方であれば、ワンタッチで自動に内圧調整ができる"かんたんモード"を搭載。

厚さ 12 cm 重さ 8.1~9.1 kg

サイズ: 幅84×全長191 (ショート180) ×厚さ12cm マット重さ: 8.6kg (ショート8.1kg)
材質/カバー: ポリウレタンフィルムラミネート加工布 (防水・制菌・防炎・透湿)、エアセル: ポリウレタンフィルム表面シボ加工 (抗菌)
消費電力: 10w、1日約4.8円

商品名	商品番号	商品コード
90cm幅 レギュラー	13-5516-1	00206-000083

サイズ: 幅90×全長191×厚さ12cm マット重さ: 9.1kg

ご利用者負担額 (1割)	700円	(2割) 1,400円	月額レンタル料金
		(3割) 2,100円	7,000円

商品名	商品番号	商品コード
90cm幅 ショート	13-5518-1	00206-000085

サイズ: 幅90×全長180×厚さ12cm マット重さ: 8.5kg

ご利用者負担額 (1割)	700円	(2割) 1,400円	月額レンタル料金
		(3割) 2,100円	7,000円

商品名	商品番号	商品コード
84cm幅 レギュラー	13-5517-1	00206-000082

サイズ: 幅84×全長191×厚さ12cm マット重さ: 8.6kg

ご利用者負担額 (1割)	700円	(2割) 1,400円	月額レンタル料金
		(3割) 2,100円	7,000円

商品名	商品番号	商品コード
84cm幅 ショート	13-5520-1	00206-000084

サイズ: 幅84×全長180×厚さ12cm マット重さ: 8.1kg

ご利用者負担額 (1割)	700円	(2割) 1,400円	月額レンタル料金
		(3割) 2,100円	7,000円

ビッグセル インフィニティ

ケープ

中度〜
リスク保有者 圧切替型



マットレスに内蔵されたセンサがヘッドアップ角度を検知して圧切替を静止し、最適な内圧に自動調整します。角度に応じた内圧調整により、圧迫感や不快感のない頭側挙上を実現できます。自動化により設定や解除のし忘れがないので、底づき防止に安全かつ確実に対応できます。

リスクの高い療養者向けのエアマットレスです。センサーがベッドの背上げを自動感知。停電対策機能でマット内圧を14日間保持。

商品名	商品番号	商品コード
90cm幅 レギュラー	13-5445-1	00206-000074
90cm幅 ショート	13-5453-1	00206-000074

サイズ: 幅90×全長191 (ショート180) ×厚さ17cm マット重さ: 8.6kg (ショート8.2kg)

商品名	商品番号	商品コード
84cm幅 レギュラー	13-5446-1	00206-000074
84cm幅 ショート	13-5476-1	00206-000074

サイズ: 幅84×全長191 (ショート180) ×厚さ17cm マット重さ: 8.3kg (ショート8.0kg)

材質/カバー: ポリウレタンフィルムラミネート加工布 (防水・制菌・防炎・透湿)、エアセル: ポリウレタンフィルム表面シボ加工 (抗菌)
消費電力: 12W、1日約6.9円

ご利用者負担額 (1割)	1,000円	(2割) 2,000円	月額レンタル料金
		(3割) 3,000円	10,000円

厚さ 17 cm 重さ 8~8.6 kg



身体の部位に合わせ保持力の異なるセルを配置し、頭部から踵部まで全身の体圧分散を行う厚み15cmの完全独立エアセル。



頭側挙上時の自動対応、停電対策などの安全性を強化

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊感知機器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車椅子・車椅子付属品

スロープ

移動用リフト・つり具

介護保険購入対象品

販売品

情報