

ベッド・
ベッド
付属品

スロープ


床ずれ
防止用具

スロープの走行における注意点

降りる時は、介助者が後ろ向きになり、支えるように降りましょう。

体位
変換器認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

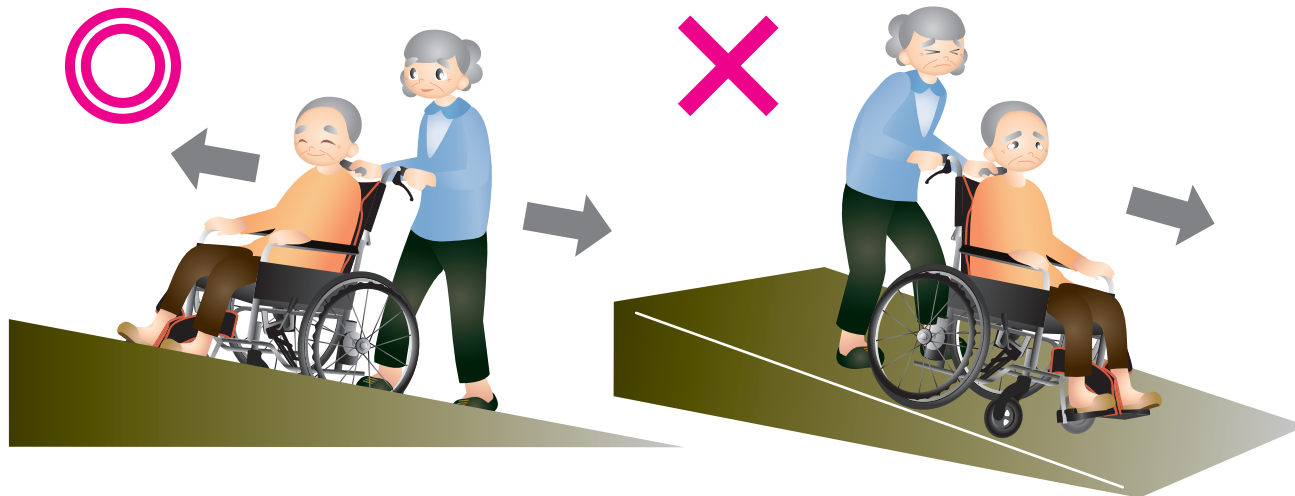歩行
補助杖

スロープの選び方

※適用傾斜角度は車いすの種類やご利用者、介助者の体力等により変化します。下記表は目安としてお使いください。
※段差に対し最低でも4倍以上の長さのスロープをお使いください。

段差の高さ スロープの長さ	5cm	10cm	15cm	20cm	25cm	30cm	35cm	40cm	45cm	50cm	60cm	70cm
65cm												
70cm												
85cm												
87.5cm												
100cm												
120cm												
125cm												
135cm												
150cm												
165cm												
175cm												
200cm												
205cm												
240cm												
245cm												
255cm												
285cm												

押してくれる人が
限界の角度



傾斜角度 10°～15°未満

自分で進む

誰かが押してくれる

でも 5°は
きつい～!




傾斜角度 5°未満



傾斜角度 10°未満

情報

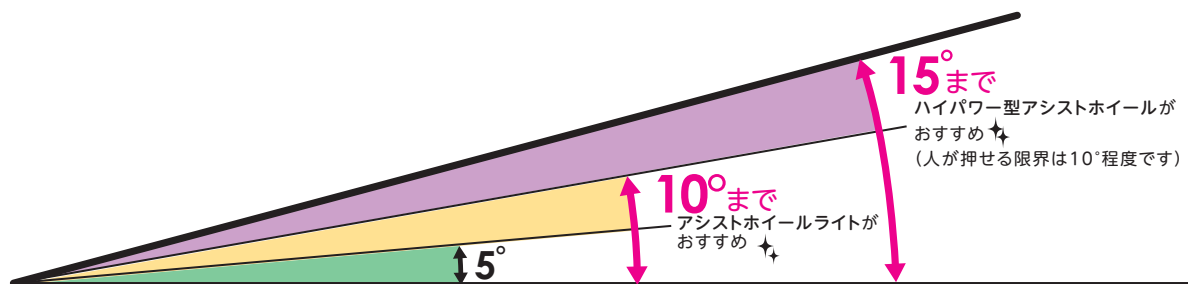

単位: cm

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税 と表記のない商品に限る)

サービスコード/スロープ 介護給付: 171008 予防給付: 671008


ベッド・
ベッド
付属品

ケアスロープ

ケアメディックス



STEP 1

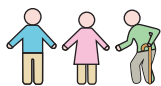

介助者の状況を確認し、選定してください。
段差の高さを確認し、スロープの長さだけでなく
角度も含めて選定してください。

「老老介護の場合 推奨角度8°
スロープの長さ
||
段差の高さ × 8倍以上

ケアスロープ選定理由例

《CS-175》


玄関に約20cmの段差があり、間口が71cmの為、設置可能であり、転倒を防止し介助負担を軽減するために選定。

《CS-240C》


玄関に約30cmの段差があり、間口が71cmの為、設置可能で脱輪防止エッジがあり車いすが安全に移動できるスロープとして選定。

STEP 2

日本家屋に多い狭い間口・場所でも設置可能な、幅狭設計です。

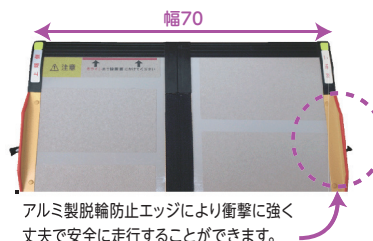

下端部までエッジが無いので、狭い場所で車いすが直角に乗り入れしやすい設計です。

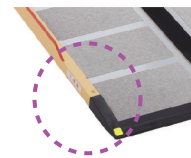

STEP 4

設置の際は必ず上端が4cm以上かかっていること、ガタツキがないこと、走行面に異物がないことを確認したうえでご使用ください。


走行面にソフトなすべり止めを採用しているため、室内使用時にスロープの上を裸足で歩いても痛くありません。



STEP 3



収納しやすい自立設計です。
様々な段差に応じて長さを選択できる
豊富なラインナップを取り揃えております。

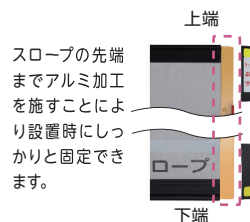

商品名	A(cm)	重さ (kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
CS-65	65	約 3	28-0979-1	00093-000015	300 円	600 円	900 円	3,000 円
CS-100	100	約 5	28-0980-1	00093-000016	500 円	1,000 円	1,500 円	5,000 円
CS-120	120	約 6	28-0981-1	00093-000017	550 円	1,100 円	1,650 円	5,500 円
CS-150	150	約 8	28-0982-1	00093-000018	600 円	1,200 円	1,800 円	6,000 円
CS-175	175	約 9	28-0983-1	00093-000019	650 円	1,300 円	1,950 円	6,500 円
CS-200	200	約 10	28-0984-1	00093-000020	700 円	1,400 円	2,100 円	7,000 円
CS-240C	240	約 12	28-1015-1	00093-000021	800 円	1,600 円	2,400 円	8,000 円
CS-285C	285	約 15	28-1092-1	00093-000038	1,000 円	2,000 円	3,000 円	10,000 円

ケアスロープJ

ケアメディックス

※全長、重さはジョイント台含む ※ケアスロープJ用ジョイント台 幅78×長さ42.5×高さ21~26cm ※スロープ2台とジョイント台をセットにしたときに介護保険適応となります

- スロープを2本つなぎ合わせることで高段差に対応。
- 3つのパーツに分割ができるので運搬、収納が容易です。
- 可搬型スロープでは無い約4mの長尺スロープになります。



商品名	スロープ全長	重さ (kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
CSJ-300	313	約28	28-1064-1	00093-000022	1,500 円	3,000 円	4,500 円	15,000 円
CSJ-325	338	約29	28-1065-1	00093-000023	1,550 円	3,100 円	4,650 円	15,500 円
CSJ-350W	363	約30	28-1100-1	00093-000044	1,650 円	3,300 円	4,950 円	16,500 円
CSJ-350	363	約30	28-1066-1	00093-000024	1,650 円	3,300 円	4,950 円	16,500 円
CSJ-375	388	約31	28-1101-1	00093-000045	1,750 円	3,500 円	5,250 円	17,500 円
CSJ-390	403	約32	28-1067-1	00093-000025	2,000 円	4,000 円	6,000 円	20,000 円
CSJ-400	413	約32	28-1103-1	00093-000048	2,000 円	4,000 円	6,000 円	20,000 円
CSJ-415	428	約33	28-1102-1	00093-000046	2,050 円	4,100 円	6,150 円	20,500 円
CSJ-440	453	約34	28-1104-1	00093-000049	2,100 円	4,200 円	6,300 円	21,000 円
CSJ-480	493	約36	28-1105-1	00093-000051	2,200 円	4,400 円	6,600 円	22,000 円

床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報

ベッド・
ベッド
付属品

スロープ

床ずれ
防止用具

ダンスロープ ライト・スリム

R-85SL 材質：グラスファイバー FRP

R-125SL ～ R-285SL：カーボンファイバー FRP

ダンロップホームプロダクツ

より軽く、より安全なスリム設計のスロープです。エッジ（高さ3.5cm。R-85SLは高さ2.5cm）により脱輪の危険性を低減。
※製法上サイズに若干の誤差が生じる場合がございます。

体位
変換器認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器


車椅子・
車椅子
付属品

スロープ


移動用
リフト・
つり具介護保険
購入
対象品

販売品

情報

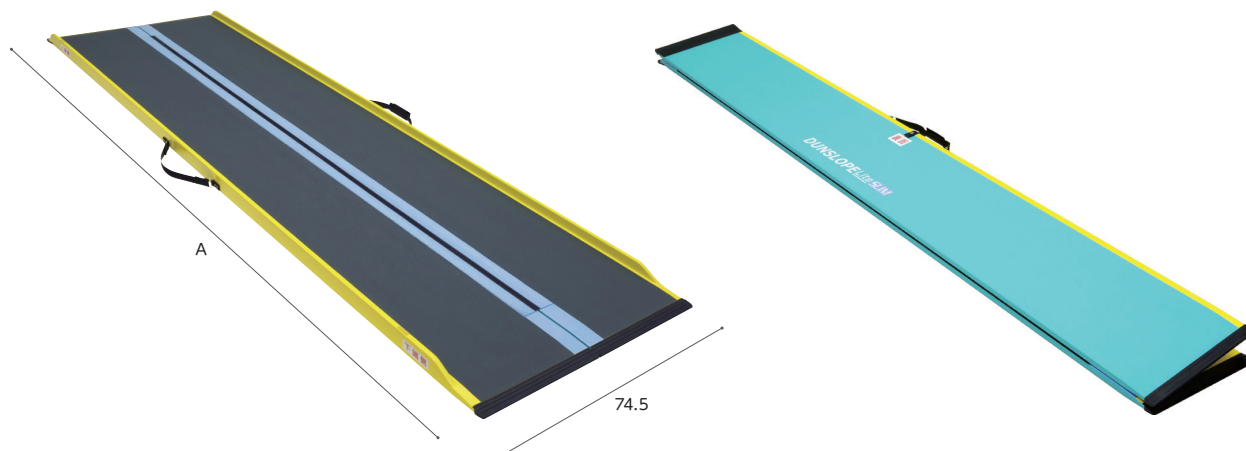


フックハンド付

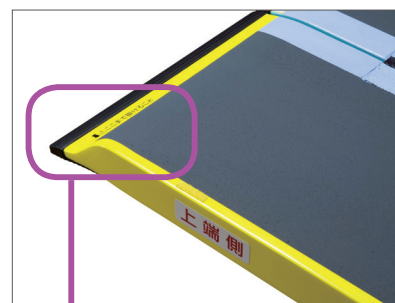

「ここまで掛けること」

全幅 38cm

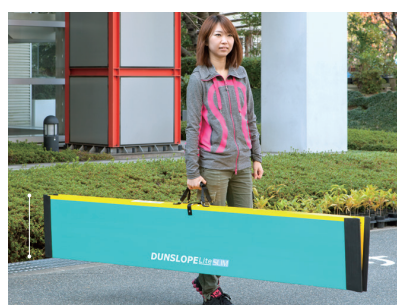

折り畳み時



使用時

商品名	A(cm)	重さ(kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
R-85SL	85	約4	28-0973-1	00532-000022	450 円	900 円	1,350 円	4,500 円
R-125SL	125	約5	28-0974-1	00532-000021	550 円	1,100 円	1,650 円	5,500 円
R-165SL	165	約7	28-0975-1	00532-000020	600 円	1,200 円	1,800 円	6,000 円
R-205SL	205	約9	28-0976-1	00532-000019	700 円	1,400 円	2,100 円	7,000 円
R-245SL	245	約11	28-0977-1	00532-000018	800 円	1,600 円	2,400 円	8,000 円
R-285SL	285	約13	28-0972-1	00532-000017	1,000 円	2,000 円	3,000 円	10,000 円

単位: cm

税込価格で表記しています。(非課税 ※非課税 と表記のない商品に限る)

サービスコード/スロープ 介護給付: 171008 予防給付: 671008


ベッド・
ベッド
付属品

インタースロープ

モルテン


小さな段差による歩行時のつまづきの防止や、車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ

安全・安心への配慮

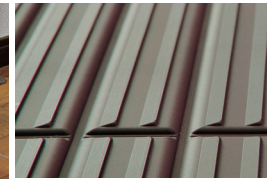

- ずれにくい素材で、置くだけで安全に使用できます。
- 滑りにくい表面形状で、靴下や靴で歩いても安心して使用できます。
- 段差が小さく滑らかな形状なので、すり足でもつまづきにくく、車いすや歩行器でも楽に走行できます。

設置例

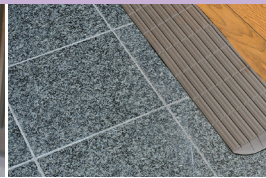

●屋外での設置

●玄関での設置例

●屋外での設置

商品名	重さ(kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
76cm×1cm	0.1	28-1079-1	00054-000173	50円	100円	150円	500円
76cm×1.5cm	0.3	28-1080-1	00054-000174	50円	100円	150円	500円
76cm×2cm	0.6	28-1081-1	00054-000175	50円	100円	150円	500円
76cm×2.5cm	0.7	28-1082-1	00054-000176	50円	100円	150円	500円
76cm×3cm	1.1	28-1083-1	00054-000177	50円	100円	150円	500円
76cm×3.5cm	1.7	28-1084-1	00054-000178	50円	100円	150円	500円
76cm×4cm	1.4	28-1085-1	00054-000179	50円	100円	150円	500円
76cm×4.5cm	2.1	28-1086-1	00054-000180	50円	100円	150円	500円
76cm×5cm	2.9	28-1087-1	00054-000181	100円	200円	300円	1,000円
76cm×5.5cm	2.6	28-1088-1	00054-000182	100円	200円	300円	1,000円
76cm×6cm	3.7	28-1089-1	00054-000183	100円	200円	300円	1,000円
76cm×6.5cm	4.7	28-1090-1	00054-000184	100円	200円	300円	1,000円

床ずれ
防止用具体位
変換器認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器


車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

エコ段差スロープN

マツ六

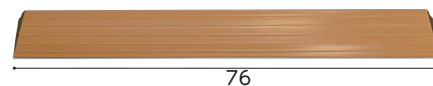

商品名	高さ(cm)	奥行き(cm)	勾配度数(kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
10N	1	4	0.2	28-1030-1	01265-000120	50円	100円	150円	500円
14N	1.4	6	0.3	28-1016-1	01265-000095	50円	100円	150円	500円
20N	2	8	0.6	28-1017-1	01265-000096	50円	100円	150円	500円
25N	2.5	10	1	28-1018-1	01265-000097	50円	100円	150円	500円
30N	3	12	1.3	28-1019-1	01265-000098	50円	100円	150円	500円
35N	3.5	14	1.9	28-1026-1	01265-000116	50円	100円	150円	500円
40N	4	16	2.3	28-1027-1	01265-000117	50円	100円	150円	500円
45N	4.5	18	2.9	28-1028-1	01265-000118	50円	100円	150円	500円
50N	5	20	3.6	28-1029-1	01265-000119	100円	200円	300円	1,000円
55N	5.5	22	4.7	28-1031-1	01265-000121	100円	200円	300円	1,000円
60N	6	24	5.7	28-1032-1	01265-000122	100円	200円	300円	1,000円

介護保険
購入
対象品

販売品

情報